

ThinPrep®Pap-Test: Probenentnahme



①



Beschriften


des ThinPrep®-Gefäßes mit dem vollständigen Namen und Geburtsdatum der Patientin. Bitte kleben Sie einen Barcode senkrecht mit der 11-stelligen Nummer nach oben auf die Banderole. Der 2. Barcode kommt auf den Anforderungsschein oder beim Muster 39 unten links waagrecht neben das Praxisstempelfeld.

②

Entfernen


von übermäßigem Schleim und Detritus mit einem großen Watteträger von der Zervix.

③

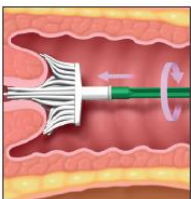

Entnahme

mit dem Zervix-Brush®. Die mittigen Lamellen der Bürste tief genug in den Zervixkanal einführen, damit die kürzeren Lamellen vollständig die Ektozervix berühren. Drei- bis fünfmal mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn drehen.

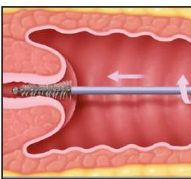

Bei engem Zervixkanal

Bei einer Zervixstenose sollte zusätzlich ein CytoBrush benutzt werden, um ausreichend endozervikale Zellen für die Diagnose zu bekommen. CytoBrush tief genug in den Zervixkanal einführen. Um Blutungen zu vermeiden, reicht maximal eine ¼ Umdrehung.

④



Ausspülen

Sofortiges Ausspülen in der Lösung. Sonst wird das Material am Entnahmebesteck fixiert. 10x auf den Boden des ThinPrep®-Gefäßes ausdrücken und den Besen dabei kräftig drehen.

Bitte das Entnahmegesetz nicht im ThinPrep®-Gefäß lassen.

⑤



Zuschrauben

Das ThinPrep®-Gefäß fest zuschrauben, bis die schwarze Markierungslinie am Deckel die schwarze Markierungslinie am ThinPrep®-Gefäß erreicht.

⑥



Versand

ThinPrep®-Gefäß und Anforderungsschein einer Patientin in eine transparente Türe stecken und anschließend in die blaue Versandtüte verpacken.

WICHTIG

Möglichst kein Gleitmittel oder Ultraschallgel verwenden, ggf. warmes Wasser

Keine Essig-Jod-Probe vor der Entnahme durchführen

Das Probenentnahmeinstrument nicht im ThinPrep®-Gefäß belassen

Stand: 10/2020